

MANEJO DE LOS LENTES

- 1 Lávese bien las manos con agua y jabón.



- 2 **NUNCA** utilice agua del grifo para enjuagar o limpiar sus lentes o su estuche. El agua del grifo puede albergar microorganismos y bacterias que pueden causar infecciones graves y difíciles de tratar.



- 3 Utilice las soluciones recomendadas por su médico. No cambie las soluciones sin consultarlo con su médico.

- 4 Si tiene un par de repuesto, guárdelo en seco* y en un estuche hasta que lo necesite. Antes de usarlos, limpie los lentes con la solución de limpieza recomendada y guárdelos durante la noche con la solución desinfectante recomendada antes de su aplicación.



Los lentes con **Tangible® Hydra-PEG® deben almacenarse húmedos.*

Mi solución de limpieza recomendada:

Felicitaciones por sus lentes BostonSight SCLERAL®!

Para garantizar el éxito de sus lentes esclerales, siga estos consejos recomendados para su cuidado y para que sus lentes sigan funcionando durante mucho tiempo.

Puede encontrar el prospecto de los lentes BostonSight SCLERAL a través del siguiente código QR.



BostonSight

464 Hillside Avenue, Suite 205, Needham, MA 02494
bostonsightscleral.org • 888-SCLERAL (888-725-3725)

042022HLHG

GUÍA DE HÁBITOS SALUDABLES PARA LENTES



BOSTONSIGHT®
SCLERAL

OPTIMUM
by Contamac®

APLICACIÓN

REMOCIÓN

LIMPIEZA DEL ESTUCHE

IMPORTANTE

1 Lávese bien las manos con agua y jabón.

2 Retire el lente del estuche y enjuague con su solución salina.



3 Llene el lente con una solución **SIN CONSERVANTES** antes de la aplicación.



1 Lávese bien las manos con agua y jabón.

2 Después de retirar el lente del ojo, frote cada lado con la solución de limpieza recomendada para eliminar las proteínas, el aceite, el maquillaje y otras acumulaciones.



3 Utilizando un estuche limpio, desinfecte las lentes durante la noche en peróxido de hidrógeno o en su solución desinfectante recomendada



Mi solución sin conservantes recomendada:

Mi solución desinfectante recomendada:

1 Vacíe completamente la solución del estuche de lentes todos los días. **NUNCA** intente reutilizar la solución.



2 Limpie el estuche con su solución desinfectante y déjelo secar al aire por completo.



NUNCA utilice agua del grifo para limpiar su estuche. Manténgalo sin tapan y colóquelo boca abajo sobre una toalla de papel limpia. Recomendamos sustituir el estuche cada 3 meses.

* Antes de utilizar cualquier tipo de colirio (medicamento o lágrima artificial), pregunte a su médico si es necesario retirar los lentes.



* Siempre vuelva a tapan las soluciones después de su uso.



* **NO** duerma con los lentes esclerales puestos.

